



Informācija par transportēšanu

Pēc paraugu iegūšanas stobriņi jāievieto statīvā vertikālā stāvoklī,

- Tālāka transportēšana jāveic vertikālā pozīcijā,
- Pēc iespējas ātrāk paraugi nogādājami uz laboratoriju (LAB-KRG-19 PR-04)
- Ja nav iespējams paraugu nogādāt laboratorijā nekavējoši, tas jāuzglabā saskaņā ar katra izmeklējamā analīta norādījumiem par stabilitāti (ZRS LAB KRG-19 4.Pielikums).

• Ja nepieciešams, līdz transportēšanai paraugu uzglabā apstākļos, kādi nepieciešami izmeklējamam materiālam un testa veidam: ledusskapī vai vides temperatūrā.

• Paraugus slēgtajās asins ņemšanas sistēmās ievieto statīvos, statīvus triecienizturīgos konteineros.

- **UZMANĪBU!** Nesūtīt paraugus bez nosūtījuma vai nosūtījumu bez parauga!
- Izmeklējamo materiālu uz laboratoriju nogādā pasūtītāja deleģēts darbinieks (sanitārs, māsu palīgs), kurš ir apmācīts rīkoties ar cilvēka bioloģisko materiālu un ir instruēta rīcībai nelaimes gadījumā.
- Nav pieļaujama paraugu transportēšana vaļējā veidā.